

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.1 Nome Comercial

FRESA DIAMANTADA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

1.2 Modelo Comercial

Código	Descrição	Código	Descrição
M30-DRD05	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 005	M30-DM9.30D-HN	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD06	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 006	M30-DM9.31D-HN	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD07	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 007	M30-DM9.33D-HN	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD08	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 008	M30-DM9.35D-HN	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD10	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 010	M30-DM9.38D-HN	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD12	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 012	M30-DM9.40D-HN	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD14	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 014	M30-DM9.42D-HN	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD15	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 015	M30-DM9.45D-HN	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD18	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 018	M30-DM9.46D-HN	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD20	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 020	M30-DM9.50D-HN	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD21	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 021	M30-DM9.55D-HN	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD23	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 023	M30-DM9.60D-HN	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD25	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 025	M30-DM9.65D-HN	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD27	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 027	M30-DM9.70D-HN	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)
M30-DRD29	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 029	M30-DRD10SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 010 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD30	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 030	M30-DRD15SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 015 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD31	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 031	M30-DRD20SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 020 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD33	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 033	M30-DRD25SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 025 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD35	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 035	M30-DRD35SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 035 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD38	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 038	M30-DRD40SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 040 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD40	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 040	M30-DRD45SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 045 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD42	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 042	M30-DRD50SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 050 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD45	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 045	M30-DRD55SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 055 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD46	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 046	M30-DRD60SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 060 (SEM ENCAIXE)
M30-DRD50	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 050	M30-DM8.20DSE	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DRD55	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 055	M30-DM8.35DSE	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DRD60	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 060	M30-DM8.45DSE	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DRD65	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 065	M30-DM12.20DSE	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DRD70	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 070	M30-DM12.35DSE	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.05D	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DM12.45DSE	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.06D	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DM16.10DSE	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.07D	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DM16.20DSE	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.08D	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DM16.25DSE	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.10D	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DM16.35DSE	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.12D	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD05SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 005 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.14D	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD06SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 006 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.15D	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD07SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 007 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.18D	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD08SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 008 (SEM ENCAIXE)

FRESA DIAMANTADA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM8.20D	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD12SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 012 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.21D	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD14SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 014 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.23D	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD18SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 018 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.25D	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD21SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 021 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.27D	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD23SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 023 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.29D	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD27SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 027 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.30D	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD29SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 029 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.31D	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD30SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 030 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.33D	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD31SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 031 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.35D	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD33SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 033 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.38D	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD38SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 038 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.40D	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD42SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 042 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.42D	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD46SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 046 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.45D	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD65SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 065 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.46D	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DRD70SE	FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 070 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.50D	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.05DSE	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.55D	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.06DSE	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.60D	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.07DSE	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.65D	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.08DSE	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.70D	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 80,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.10DSE	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.05D	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.12DSE	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.06D	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.14DSE	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.07D	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.15DSE	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.08D	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.18DSE	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.10D	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.21DSE	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.12D	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.23DSE	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.14D	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.25DSE	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.15D	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.27DSE	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.18D	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.29DSE	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.20D	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.30DSE	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.21D	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.31DSE	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.23D	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.33DSE	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.25D	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.38DSE	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.27D	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.40DSE	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.29D	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.42DSE	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.30D	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.46DSE	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.31D	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.50DSE	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.33D	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.55DSE	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.35D	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.60DSE	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.38D	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.65DSE	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.40D	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM8.70DSE	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 80,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)

FRESA DIAMANTADA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM9.42D	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.05DSE	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.45D	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.06DSE	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.46D	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.07DSE	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.50D	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.08DSE	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.55D	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.10DSE	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.60D	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.12DSE	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.65D	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.14DSE	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.70D	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 90,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.15DSE	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.05D	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.18DSE	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.06D	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.20DSE	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.07D	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.21DSE	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.08D	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.23DSE	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.10D	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.25DSE	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.12D	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.27DSE	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.14D	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.29DSE	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.15D	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.30DSE	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.18D	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.31DSE	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.20D	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.33DSE	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.21D	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.35DSE	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.23D	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.38DSE	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.25D	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.40DSE	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.27D	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.42DSE	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.29D	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.45DSE	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.30D	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.46DSE	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.31D	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.50DSE	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.33D	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.55DSE	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.35D	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.60DSE	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.38D	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.65DSE	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.40D	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM9.70DSE	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 90,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.42D	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.05DSE	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.45D	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.06DSE	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.46D	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.07DSE	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.50D	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.08DSE	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.55D	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.10DSE	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.60D	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.12DSE	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.65D	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.14DSE	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.70D	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 110,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.15DSE	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)

FRESA DIAMANTADA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM12.05D	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.18DSE	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.06D	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.20DSE	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.07D	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.21DSE	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.08D	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.23DSE	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.10D	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.25DSE	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.12D	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.27DSE	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.14D	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.29DSE	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.15D	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.30DSE	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.18D	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.31DSE	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.20D	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.33DSE	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.21D	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.35DSE	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.23D	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.38DSE	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.25D	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.40DSE	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.27D	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.42DSE	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.29D	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.45DSE	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.30D	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.46DSE	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.31D	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.50DSE	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.33D	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.55DSE	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.35D	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.60DSE	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.38D	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.65DSE	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.40D	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM11.70DSE	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 110,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.42D	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.05DSE	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.45D	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.06DSE	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.46D	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.07DSE	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.50D	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.08DSE	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.55D	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.10DSE	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.60D	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.12DSE	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.65D	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.14DSE	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.70D	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 120,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.15DSE	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.05D	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.18DSE	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.06D	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.21DSE	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.07D	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.23DSE	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.08D	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.25DSE	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.10D	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.27DSE	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.12D	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.29DSE	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.14D	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.30DSE	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.15D	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.31DSE	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)

FRESA DIAMANTADA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM16.18D	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.33DSE	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.20D	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.38DSE	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.21D	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.40DSE	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.23D	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.42DSE	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.25D	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.46DSE	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.27D	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.50DSE	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.29D	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.55DSE	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.30D	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.60DSE	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.31D	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.65DSE	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.33D	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM12.70DSE	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 120,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.35D	FRESA ESFÉRICA 3,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.05DSE	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.38D	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.06DSE	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.40D	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.07DSE	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.42D	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.08DSE	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.45D	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.12DSE	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.46D	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.14DSE	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.50D	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.15DSE	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.55D	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.18DSE	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.60D	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.21DSE	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.65D	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.23DSE	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.70D	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 160,0MM DIAMANTADA	M30-DSEM16.27DSE	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.05D-HN	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.29DSE	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.06D-HN	FRESA ESFÉRICA 0,6 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.30DSE	FRESA ESFÉRICA 3,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.07D-HN	FRESA ESFÉRICA 0,7 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.31DSE	FRESA ESFÉRICA 3,1 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.08D-HN	FRESA ESFÉRICA 0,8 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.33DSE	FRESA ESFÉRICA 3,3 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.10D-HN	FRESA ESFÉRICA 1,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.38DSE	FRESA ESFÉRICA 3,8 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.12D-HN	FRESA ESFÉRICA 1,2 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.40DSE	FRESA ESFÉRICA 4,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.14D-HN	FRESA ESFÉRICA 1,4 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.42DSE	FRESA ESFÉRICA 4,2 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.15D-HN	FRESA ESFÉRICA 1,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.45DSE	FRESA ESFÉRICA 4,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.18D-HN	FRESA ESFÉRICA 1,8 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.46DSE	FRESA ESFÉRICA 4,6 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.20D-HN	FRESA ESFÉRICA 2,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.50DSE	FRESA ESFÉRICA 5,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.21D-HN	FRESA ESFÉRICA 2,1 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.55DSE	FRESA ESFÉRICA 5,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.23D-HN	FRESA ESFÉRICA 2,3 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.60DSE	FRESA ESFÉRICA 6,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.25D-HN	FRESA ESFÉRICA 2,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.65DSE	FRESA ESFÉRICA 6,5 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.27D-HN	FRESA ESFÉRICA 2,7 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)	M30-DSEM16.70DSE	FRESA ESFÉRICA 7,0 X 160,0MM DIAMANTADA (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.29D-HN	FRESA ESFÉRICA 2,9 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL)		

1.3 Número da Cadastramento do Produto

Registro ANVISA: 82549199002

1.4 Acessórios

NÃO APLICÁVEL

1.5 Formas de Apresentação Comercial do Produto/Componentes do Conjunto

As **Fresas diamantadas cirúrgica descartável Macom** são fornecidas na condição montada, estéril, pronta para uso, embalada individualmente em dupla embalagem sendo blister selado com papel cirúrgico (embalagem primária) e embalagem tubular (embalagem secundária), acondicionado em cartuchos de papel cartão para transporte e acondicionamento.

A instrução de uso está disponibilizada no seguinte endereço eletrônico: <http://www.m30medicaldevices.com.br/instrucoes/>

A versão atual da instrução de uso deste produto está descrita no próprio endereço eletrônico encontrado no rótulo do produto.

É importante conferir a versão da instrução de uso descrita no rótulo do produto com a versão da instrução de uso disponibilizada no sítio eletrônico da **M30 Medical Devices**. A versão deve ser a mesma.

Caso seja necessário obter a instrução de uso em formato impresso, favor entrar em contato com a **M30 Medical Devices** que enviaremos sem custo adicional (inclusive de envio), essa instrução de uso. Solicitar para: e-mail m30medicaldevices@m30medicaldevices.com.br ou pelo telefone **(11) 4780 5733**.

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

2.1 Indicação de Uso/Finalidade

As **Fresas diamantadas cirúrgicas descartáveis Macom** é uma família de produtos descartáveis, "**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**", destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração e modelagem óssea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, e PANTHER - High Performance Pneumatic System Trépano-Craniótomo-Drill MACOM.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Este produto não apresenta contra-indicações desde utilizado da maneira correta.

A utilização do produto é inerente à formação profissional.

2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

As **Fresas diamantadas cirúrgicas descartáveis Macom** é uma família de **produtos descartáveis**, "**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**", destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração e modelagem óssea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, e PANTHER - High Performance Pneumatic System Trépano-Craniótomo-Drill MACOM.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Este produto não apresenta contra-indicações desde utilizado da maneira correta.

A utilização do produto é inerente à formação profissional.

2.3 Composição:

São fabricados em aço inoxidável em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7153-1. Possuem formato característico, apresentados em diversos tamanhos de ponta (parte ativa) comprimentos (haste), os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos. Na parte ativa há um revestimento de diamante natural atóxico.

Revestimento: A parte ativa e a haste são revestidas com nitreto de titânio.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

"FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO".

Os produtos desta família não possuem componentes e acessórios associados.

Este produto não acompanha componente implantável.

2.4 Dimensões/volumes

Dimensões da Embalagem (Largura x Comprimento x Altura):

- Produto com comprimento até 90mm de comprimento: CARTUCHO PERSONALIZADO 110 X 188 X 26mm

- Produto com comprimento maior que 90mm de comprimento: CARTUCHO PERSONALIZADO 110 X 323 X 26mm

Obs.: As dimensões da embalagem variam conforme dimensões do modelo produto.

2.5 Produto Estéril

- Sim
- Não

2.6 Método de esterilização

Esterilizado por Óxido de Etileno.

2.7 Prazo de Validade

5 anos

2.8 Fabricante Recomenda o Uso Único

- Sim
- Não

2.9 Produto de Reprocessamento Proibido (Conforme RE 2605/2006)




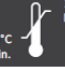

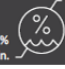




- Sim
- Não

Produto com Reprocessamento Proibido, conforme inciso I do art. 4º da Resolução ANVISA RDC Nº 156, de 11 de agosto de 2006. Enquadramento do produto realizado, na solicitação de cadastro junto à ANVISA, conforme Parágrafos 2º e 3º do art. 4º da Resolução RDC 156/01, tendo em vista, a proposição de enquadramento como produto com reprocessamento proibido estar acompanhada de documentação que fundamenta esta indicação, de acordo com o Parágrafo 4º do art. 4º desta mesma resolução.

2.10 Condições para Armazenamento

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, seco e isento de contaminação. Os produtos devem ser armazenados limpo, seco e embalado.

Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação dos produtos devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme as diretrizes da RDC 665/22.

	Produto de uso único Single use product Producto de un solo uso
	Atenção! Consultar instruções de uso Attention, consult instructions for use Atención, consulte las instrucciones para su uso
	Produto estéril Sterile product Producto estéril
	Limitação de temperatura máxima / temperatura mínima Maximum temperature limitation / minimum temperature Limitación de la temperatura máxima / temperatura mínima
	Quantidade de material por caixa Amount of material per box Cantidad de material por caja
	Limites de umidades - UR Humidity limits Limites de humedad
	Manter ao abrigo do sol Keep away from the sun Mantener lejos del sol
	Manter seco Keep dry Mantenga seco
	Frágil Fragile Frágil
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não usar se a barreira de esterilização do produto ou embalagem estiverem comprometidas. Do not use if the packaging is damaged. Do not use if the barrier of sterilization of the product or packaging are compromised. No utilizar si está dañado el embalaje. No utilizar si la barrera de la esterilización del producto o envase se ven comprometida.

2.11 Condições para o Transporte

O transporte deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.12 Condições de Manipulação

O manuseio deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.13 Advertências

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As **Fresas diamantadas cirúrgicas descartáveis Macom** são fornecidas estéreis.

O fabricante recomenda uso único. **DESCARTAR APÓS O USO.**

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril. O fabricante recomenda uso único. **DESCARTAR APÓS O USO.** O desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A M30 não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.14 Precauções

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As **Fresas diamantadas cirúrgicas descartáveis Macom** são fornecidas estéreis.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições. Produto fornecido estéril. A M30 recomenda uso único (descartável). Este produto não deve ser reutilizado, pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A M30 não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.15 Efeitos Adversos

Não foram constatados efeitos adversos diretamente relacionados a esta família de produtos. Este produto não produz nenhum efeito adverso indesejável se todas as recomendações, advertências/precauções descritas neste documento forem adotadas.

3. ORIGEM DO PRODUTO

3.1 Nome do Fabricante:

M 30 MEDICAL DEVICES LTDA

CNPJ: 41.167.350/0001-24

Autorização de Funcionamento – AFE/ANVISA: 8.25491-9 (17525450LM9H)

3.2 Endereço do Fabricante:

Avenida Tower Automotive, 701 - Galpão 01 - Laranja Azeda

CEP 07.430-350 – Arujá / SP - BRASIL

Fone/Fax: +55 11 4780-5733

site: www.m30medicaldevices.com.br

e-mail: sac@m30medicaldevices.com.br

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng. William Fernandes de Lima

CREA-SP 5063256282